



**MANUAL INSTRUCTIVO  
COMPRESERO DE 4  
GVM-P4**



### ESTA GARANTIA NO-SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las establecidas.
2. - Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
3. - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas

## INDICE

### INTRODUCCIÓN

#### 1. -ESPECIFICACIONES

Características  
Instalación  
Advertencias

#### 2. - OPERACIÓN

Modo de uso

#### 3. -MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpieza  
Recomendaciones

#### 4. - GARANTIA

Póliza de garantía

## INTRODUCCION

Gracias por adquirir la unidad GVM-P4 (compresero de 4 compresas)

Este manual contiene instrucciones generales de seguridad, funcionamiento, mantenimiento y cuidado para los propietarios y operarios de las unidades de terapia GVM-P4.

La calidad y el prestigio son nuestras vestimentas en la tarea ardua de cada día, de esta forma hemos logrado la consolidación de cada uno de nuestros proyectos; llevando a usted un producto 100% mexicano y con la más alta calidad y a la vanguardia en tecnología.

## 4. -GARANTIA

### \*POLIZA DE GARANTIA.

**Producto : Compresero de 4 compresas**

**Modelo: GVM-P4**

**Marca : ThermoSteel**

**N/S:**

Se garantiza este producto por el término de 1 año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### \*CONDICIONES

1. - Para hacer valida esta garantía, se requiere. La presentación de esta póliza, la nota de compra o factura y el empaque original del producto, en el lugar donde fue adquirido.
2. -La empresa se compromete a reparar el producto, en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación que se deriven serán cubiertos con anticipación por el cliente.
3. - El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la recepción del producto.

### 3. -MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

#### • Limpieza

- Limpiar el aparato superficialmente con un trapo húmedo.
- La limpieza de la tina interior deberá efectuarse con detergente y solución de hipoclorito de sodio (en porcentaje bajo) esto es para evitar formación de bacterias dentro de la tina.
- No use solventes (alcohol, thinner, etc.) para limpiar la unidad.

#### • Recomendaciones

- Desconecte la unidad de la toma corriente para evitar cualquier descarga eléctrica.
- Procure enrollar el cable de alimentación para evitar accidentes.
- Evite arrojar agua en la parte exterior, debido a que puede provocar un daño permanente en el sistema de control eléctrico.
- La limpieza de la unidad será de por lo menos 2 veces al mes.

### 1. - ESPECIFICACIONES

#### CARACTERÍSTICAS

Antes de operar el equipo, lea detalladamente cada uno de los puntos establecidos en este manual y siga cada paso conforme al mismo.

El compresero **GVM-P4** de la marca **ThermoSteel** presenta las siguientes características.

- Requerimientos de Voltaje 120 VCA 60Hz
- Potencia 1000W
- Rango de temperatura 30 – 85°C
- Termostato Regulador de temperatura de 71° C a 74° C con alta precisión de +/- 3 %, que da una confiabilidad al usuario.
- Termostato de parada termica. Termostato Adicional para seguridad del usuario el cual corta a una temperatura automáticamente entre 82°C a 85°C, con una Precisión del 10%
- Tubería Contiene tubería con terminado en acero inoxidable
- Construcción Gabinete fabricado en acero inoxidable
- Dimensiones Largo: 68cm Ancho: 42cm Alto: 80cm

## • INSTALACION.

- Antes de iniciar cualquier proceso de instalación, asegúrese de contar con el equipo necesario así como del manual y la herramienta adecuada.
- La instalación del equipo no requiere de personal técnico calificado.

### - Instrucciones:

- Sacar con cuidado la unidad de la caja de empaque y colocarla cerca de una toma corriente apropiada.
- Quitar todas las cintas de embalaje y los materiales de empaque.
- Asegúrese que su instalación eléctrica cuenta con tierra física.
- Conecte la clavija a la toma corriente.
- Llene el interior del compresero hasta cubrir la rejilla porta compresas; esto es aproximadamente  $\frac{3}{4}$  de su capacidad.
- ¡Esta listo ahora para ponerlo en marcha!
- Identifique el interruptor de encendido, este se encuentra en la parte posterior de la unidad.
- Mueva el interruptor a la posición "ON"
- Gire la perilla a la temperatura deseada y el termostato controlara automáticamente la temperatura.
- ¡Ahora la unidad se encuentra funcionando!

## ADVERTENCIAS

- No conectar la unidad a una fuente de alimentación no segura ó que exceda el voltaje recomendado.
- No colocar la unidad en una zona de alta afluencia (pasillos, zona de terapia infantil etc.
- No utilizar la unidad cerca de equipos de terapia o de equipos emisores de ondas electromagnéticas (monitores, teléfonos móviles, aparatos emisores-receptores etc.)
- No encienda la unidad si no cuenta con agua en el interior, está debe de estar por lo menos hasta cubrir el elemento térmico.

## Contraindicaciones

No utilizar las compresas calientes en los siguientes casos.

- No utilizar las compresas calientes, si no, esta autorizado por un medico o especialista en el área.
- No utilizar las compresas calientes en heridas o piel sensible

## 2. -OPERACIÓN

### • MODO DE USO.

- La unidad modelo **GVM-P4** de la marca **ThermoSteel** tiene un sistema de operación muy sencillo y fácil de operar.

- Instrucciones de uso:
- Al momento de encender la unidad, el usuario debe girar la perilla a la temperatura a la cual desea que el compresero trabaje en ese momento el termostato activa el elemento térmico este a su vez comenzara a calentar el agua; de esta manera cada una de las compresas adquirirá calor.









