

THERACARE
PARAFFIN

TANQUE DE PARAFINA 6 LIBRAS
TRATAMIENTO CON PARAFINA
HYD-TP6



MANUAL INSTRUCTIVO

INDICE

INTRODUCCIÓN


1.-DIAGRAMA	page 3
2. - PARTES DEL EQUIPO.....	page 4
Instrucciones.....	page 4
3.- CONSEJOS DE OPERACIÓN.....	page 5
6. - GARANTIA.....	page 7

**PARAFINERO
TANQUE DE 6 LIBRAS
TRATAMIENTO CON PARAFINA**



Tanques de parafina para uso institucional. Disponible en tamaños Estandar con capacidad de 6 libras fabricado totalmente en acero inoxidable, tienen alta resistencia a la corrosión, el tanque interno esta aislado y es controlado por un termostato, en el tanque exterior esta el indicador de encendido el cual refleja una luz para indicar que la parafina se está calentando.

TODAS LAS DIMENSIONES ENTRE PARENTESIS ESTAN EN MILIMETROS

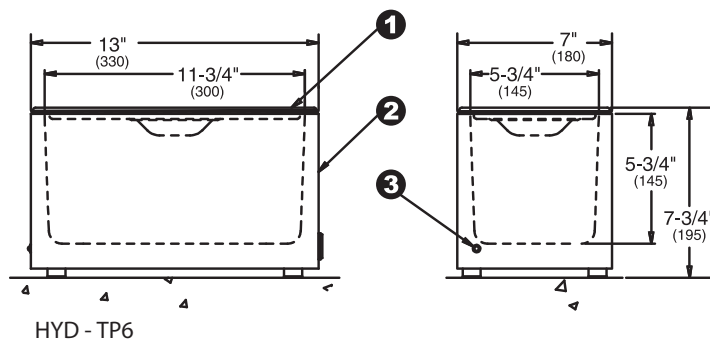

- NOTES:
- 1) Tapa de Acero Inoxidable
 - 2) Tanque de Parafina
 - 3) Indicador de Encendido

Los tanques de parafina estacionario de Hydromedic proporcionan un método simple y eficaz de aplicar calora la superficie de la mano o del pie para aumentar la circulación. Toda la unidad está hecha de acero inoxidable. La unidad está controlada termostáticamente y amueblada con una cubierta. Una luz indicadora de potencia muestra que la parafina se está calentando.

PARTES DEL EQUIPO

Descripción	No. de Parte / Modelo
Switch / Interruptor de balancin 2 polos	Bts - 17
Foco piloto led 22 mm color rojo 20 Amp 2.5	HD16 - 22DSV
Resistencia electrica recubierta acero inox 1000w-120v	FABNAC - 9A
Cable de alta temperatura calibre 300° C - 600 v	CAT26121613
Porta fusible Americano de Resea 15 Amp 250 v	39121629-PF
Fusible 15 Amp - 250 v	-----
Controlador de temperatura	TZN4S - 14R

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Coloque el equipo en una superficie adecuada y nivelada, cerca de un toma corriente.

- 2- Añadir la parafina a la unidad, asegúrese de que cada barra esté colocada individualmente en la unidad para que entren en contacto con la parte inferior del tanque para que se fundan correctamente.

- 3.- Su unidad de parafina ahora esta lista para conectarse, la luz indicadora en la parte frontal de la unidad se encenderá indicando que la unidad está encendida. La unidad tomará de 10 a 12 horas para derretir toda la parafina por completo. Una vez que la parafina este completamente derretida, su unidad estará lista para usar.

NOTA: ¡NO CONECTE LA UNIDAD HASTA QUE EL PASO 2 SE COMPLETE!

CONSEJOS DE OPERACIÓN

¿Cuándo necesito agregar parafina?

Agregue parafina cuando el nivel de parafina en su tanque caiga por debajo de una profundidad de 3"

El uso de una unidad sin parafina suficiente en el tanque puede causar grandes variaciones de temperatura en el baño de parafina.

¿Por qué hay material extraño en el fondo del tanque?

El material en la parte inferior del tanque está contaminando, como suciedad o piel muerta que se acumula después de un uso prolongado o al volver a colocar la parafina usada en la unidad después del tratamiento. Cuando esto suceda, recomendamos retirar la parafina usada, limpiar la unidad y agregar nueva parafina.

¿Por qué hay una película de parafina solidificada en la superficie superior de mi tanque?

La parafina ha perdido algo de su aceite a través del uso normal. Agregue aceite de parafina (aceite mineral de grado alimenticio) según necesario o reemplace la parafina.

Para obtener los resultados esperados, es fundamental contar con buen material y aquí, obviamente lo principal es la parafina. Desde Material Estética te recomendamos que recurras a sustancias que puedan aportar un beneficio extra al tratamiento, como la parafina con naranja y melocotón, que posee propiedades antioxidantes y rejuvenecedoras de la piel o la parafina con manteca de karité, que actúa como un poderoso emoliente. No obstante, las propiedades de la parafina pueden estropearse si esta no se calienta en un recipiente adecuado.

Así, lo ideal es hacerlo en un calentador digital para parafina, ya que incorpora un regulador de temperatura que evitará que la parafina queme y te permitira mantenerla a la temperatura óptima para el tratamiento.

Por último también necesitarás tener unas bolsas de plástico para parafina y manoplas o manoplas o en su defecto toallas, para concentrar el calor y potenciar el efecto del tratamiento.

Ahora ya estás listo, por lo que puedes comenzar con el baño de parafina siguiendo las siguientes recomendaciones.

El baño de parafina, paso a paso

Antes que nada, pon a calentar la parafina, ajustando el termostato del contenedor a la temperatura óptima (entre 48 y 57 grados) Cuando haya alcanzado ese punto, puedes comenzar, siguiendo estos pasos:

Con los dedos abiertos, sumerge la mano en la parafina durante unos 3 segundos y sácala (ten cuidado de que en ningún momento toque el fondo o las paredes del contenedor. Repite este proceso unas tres o cuatro veces más, hasta que la mano quede cubierta con una capa gruesa.

Envuélve en una de las bolsas de plástico, y repite el mismo proceso con la otra mano.

Una vez que tengas las dos manos con el plástico, introdúcelas en las manoplas puedes haberlas calentado antes en un calentador de toallas a fin de eliminar gérmenes y potenciar el efecto del tratamiento y mantenerlas así durante unos 15 ó 20 minutos.

Transcurrido el tiempo de espera, quita las manoplas y el plástico y empieza a retirar la parafina empujando con suavidad. Finaliza aplicando una loción hidratante con ligero masaje, ¡Ya sabes todo lo necesario para conseguir unas manos hidratadas y rejuvenecidas con el tratamiento de parafina!

THERACARE
PARAFFIN

GARANTIA

***POLIZA DE GARANTIA.**

Producto : Parafinero de 6 libras

Modelo: HYD-TP6

Marca : TheraCare

N/S:

Se garantiza este producto por él término de 1 año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

***CONDICIONES**

1. - Para hacer valida esta garantía, se requiere. La presentación de esta póliza, la nota de compra o factura y el empaque original del producto, en el lugar donde fue adquirido.
2. -La empresa se compromete a reparar el producto, en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación que se deriven serán cubiertos con anticipación por el cliente.
3. - El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la recepción del producto.



www.hydromedic.com.mx

Contamos con Parafinero de
los siguientes tamaños:

6 libras

22 libras

48 libras

50 libras